

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具(70722000)

インプレッションディスク

【形状・構造及び原理等】

1)材質：ポリエチレン系樹脂、顔料

2)形状、構造

ディスク状で以下の寸法を有する。

測定箇所	T20
直径	98.5
厚さ	20

※23℃環境下における寸法値（単位：mm）

3)色調：歯冠色（アイボリー）

4)原理

本品を歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（CAD/CAMシステム）で切削加工することにより、印象体を作製する。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

- ①本品を CAD/CAM 装置にセットし、切削加工する。
- ②取扱説明書に従い、模型を作製する。
- ③インプラントアナログを石こう又は即時重合レジンで固定する。

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) 本品を口腔内で使用しないこと。
- 2) 室温下（15℃～25℃）で使用すること。

【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ①適切な CAD/CAM システムを使用すること。
- ②使用する CAD/CAM システムの使用方法に従い、切削加工すること。
- ③本品の研削、研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
また、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用すること。
- ④他の製品と混用しないこと。

2)重要な基本的注意

- ①本材に対して発疹、皮膚炎など過敏症のある術者は、手袋などを着用して直接本材に触れないようにすること。
- ②本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 50℃以下で保管すること。
- ・ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

[お問い合わせ先]

株式会社 E-Joint ハーキンド事業部

電話番号：04-2941-2270
FAX番号：04-2968-3731
e-mail：info@harkindo.jp

※取扱説明書は下記よりご参照ください。

https://www.harkindo.jp/catalog_manual/



取扱説明書を必ずご参照ください。